



exeol renov

Renovador de instrumentos de acero inoxidable

- **Fórmula concentrada para uso por inmersión.**
- **Participa en la renovación de la capa de pasivación para una mejor resistencia a la corrosión.**
- **Uso en cubetas de inmersión manual y ultrasónicos.**
- **Devuelve el brillo a los instrumentos.**
- **Compatibilidad con acero inoxidable validada por estudio electroquímico.**



INSTRUMENTOS

PRODUCTO

DESDE
1%

BUENAS PRÁCTICAS



Archivo del producto disponible en www.exeol.fr

Instrucciones de uso

▪ Frasco dosificador de 1L:

Quitar el tapón y presionar los laterales de la botella para obtener la dosis deseada. Diluir la dosis obtenida con agua a temperatura ambiente: del 1 % (10mL/L) al 4 % (40mL/L). Volver a cerrar el frasco después de su uso.

▪ Bidón 5L:

Cuando se use por primera vez, retirar el anillo de inviolabilidad y luego desenroscar el tapón. Fijar la bomba de 10mL en el bidón y cebarla. No utilizar la dosis obtenida hasta que la bomba esté completamente cebada. Usando la bomba dosificadora, diluir el concentrado con agua a temperatura ambiente: del 1% (10mL/L) al 4% (40mL/L).

▪ Uso:

La solución diluida y no utilizada se puede conservar en una bandeja cubierta durante 72 horas.

1. Colocar los instrumentos de acero inoxidable abiertos y desmontados en la solución y asegurarse de que estén totalmente sumergidos.
2. Tiempo de contacto: 1 hora (o más según el estado de la instrumentación).
3. Retirar los instrumentos de acero inoxidable, aclararlos cuidadosamente con agua.
4. Secar.

La solución utilizada debe cambiarse después de cada uso.

exeol renov puede utilizarse en una cubeta de ultrasonidos.

Composición	Características	Precauciones
Menos de un 5% de tensioactivos aniónicos.	▪ pH puro: 0,35 - 1,35 ▪ pH 4%: 1,2 - 2,2 ▪ Perfume: Sin perfume. ▪ Color: Incoloro a amarillo.	Usar sólo en acero inoxidable. Lea siempre la etiqueta y las informaciones sobre el producto antes de usarlo. UFI : D7E9-405V-900U-VIY2

Presentación comercial

- Caja de 3 x 1L dosificador: EXS0117
- Caja de 2 x 5L: EXS0131

SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

Medifar
www.medifar.com
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

SANTÉ
exeol
UNA DIVISIÓN DE SODEL