



exeol clean 4E

Detergente multienzimático

► Solución enzimática concentrada para diluir:

- para la limpieza por inmersión de dispositivos médicos reutilizables invasivos y no invasivos, antes de la esterilización o desinfección final.
- para la limpieza de instrumentos quirúrgicos y accesorios en lavadora desinfectante o túnel de lavado antes de la esterilización.

Complejo de 4 enzimas: Proteasa, Lipasa, Amilasa, Mananasa.

INSTRUMENTOS ENDOSCOPIA

- **Formulación sinérgica de 4 enzimas esenciales para la detergencia unidos a tensioactivos y un agente secuestrante fácilmente biodegradable.**

- **Utilización en remojo manual, cubetas de ultrasonidos y lavadora desinfectadora de instrumentos.**

- **Rendimiento de detergencia validado según los principales indicadores de limpieza del mercado (p. ej.: TOSI®, Browne®).**

- **Sin EDTA, sin NTA, sin fosfatos.**

- **Compatible con la mayoría de materiales, incluidos los aceros inoxidables, según norma NF S94-402-1 (mayo 2004).**



+ PRODUCTO

DOBLE
USO

4
ENZIMAS

FÓRMULA
CONCENTRADA

BUENAS PRÁCTICAS



Archivo del producto disponible en
www.exeol.fr/es

Presentación comercial

Uso por inmersión:

- Caja 6 x 1L dosificador: EXS0060
- Caja 4 x 5L + 1 bomba 20mL: EXS0091

Uso en LDI/túneles:

- Caja 2 x 5L LDI: EXS0075

Marcado CE en 2023
DM de clase I



Medifar
www.medifar.com
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

**SANTÉ
exeol**
UNA DIVISIÓN SODEL

exeol clean 4E

Instrucciones de uso

Uso por inmersión:

▪ Frasco dosificador 1L:

Quitar el tapón y presionar los laterales del frasco para obtener la dosis deseada. Diluir la dosis obtenida con agua a temperatura ambiente: del 0,2 % (2mL/L) al 0,5 % (5mL/L). Volver a cerrar el frasco después de su uso.

▪ Bidón 5L:

Cuando se use por primera vez, retirar el anillo de inviolabilidad y luego desenroscar el tapón. Fijar la bomba de 20mL en el bidón y cebarla. No utilizar la dosis obtenida hasta que la bomba esté completamente cebada. Usando la bomba dosificadora, diluir el concentrado con agua a temperatura ambiente: del 0,2 % (2 mL/L) al 0,5 % (5 mL/L).

Uso:

La solución diluida y no utilizada se puede conservar en una bandeja cubierta durante 72 horas.

1. Colocar los dispositivos médicos abiertos y desmontados en la solución y asegurarse de que estén totalmente sumergidos.
 2. Limpiar, cepillar, escobillar e irrigar los canales. Tiempo de contacto: a partir de 5 min.
 3. Retirar los dispositivos médicos y aclararlos cuidadosamente con agua.
- La solución utilizada debe cambiarse después de cada uso.

exeol clean 4E puede utilizarse en una cubeta de ultrasonidos.

Uso en LDI/túneles:

Cuando se use por primera vez, retirar el anillo de inviolabilidad y luego desenroscar el tapón. Colocar el bidón en el lugar previsto a tal efecto en la lavadora desinfectadora o cerca de ella y sumergir en él la varilla de extracción para la fase de lavado. Si se cambia el dispositivo en la lavadora desinfectadora, purgar y enjuagar previamente las tuberías y el sistema de dosificación con agua limpia. No reciclar la solución de lavado.

exeol clean 4E debe inyectarse durante la fase de lavado.

Dilución incluida entre un 0,2 % (2mL/L) y 0,5 % (5mL/L) a una temperatura de 55 °C desde 2 minutos. La dosis óptima depende de las especificaciones del lugar (calidad del agua, tipo de lavadora desinfectadora y material a tratar, nivel de suciedad).

A continuación, utilizar **exeol rinse matic** para la fase de desinfección térmica (enjuague final).

Respetar las instrucciones de los fabricantes de los dispositivos médicos a tratar y de la lavadora desinfectadora.

Composición	Características	Precauciones
Tensioactivos no iónicos, enzimas (proteasa, lipasa, amilasa, mananasa), agente quelante fácilmente biodegradable (GLDA), agentes conservantes (FENOXIETANOL y BENZISOTIAZOLINONA), excipientes.	▪ pH puro: 8,0 - 9,0 ▪ pH al 0,2 % - 0,5 %: 7,0 - 8,0 ▪ Perfume: No perfumado ▪ Color: Amarillo fluorescente	Lea siempre la etiqueta y las informaciones sobre el producto antes de usarlo. UFI : CM89-S0WE-S003-4MGK  ATENCIÓN

SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

Medifar
www.medifar.com
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

SANTÉ
exeol
UNA DIVISIÓN SODEL