



# exeol surf optimal

**Detergente desinfectante sin alcohol para superficies y dispositivos médicos**

Solución lista para usar:

- **Aplicación dispositivo médico:** para la limpieza y la desinfección por frotamiento de superficies de dispositivos médicos reutilizables invasivos y no invasivos.
- **Aplicación producto biocida:** para la limpieza y la desinfección por frotamiento de superficies, mobiliario y equipos pesados.

- **Asociación sinérgica original de dos activos antimicrobianos (efecto SCALE).**
- **Activo en 2 min. (bactericida, levuricida y virucida contra los virus envueltos).**
- **Efecto de limpieza potenciado por un tensioactivo seleccionado por conferir una baja tensión superficial ( $TS < 27 \text{ mN/m}$ ).**
- **Amplia compatibilidad con los materiales.**
- **Adaptado a las superficies en contacto con alimentos.**



**SUPERFICIES**

## Instrucciones de uso

⚠ **exeol surf optimal** se utiliza sin diluir.

Cuando se use por primera vez, retirar la protección de inviolabilidad de la boquilla.

1. Desbloquear la seguridad del spray.
2. Pulverizar uniformemente sobre la superficie para cubrir la zona a tratar ( $\pm 6 \text{ mL/m}^2$ , a 20-30cm de la superficie).
3. Limpiar la superficie por frotamiento.
4. Tiempo de contacto: a partir de 2 min., según el espectro de actividad deseado. Después del tiempo de contacto adecuado, dejar secar o secar con una toallita seca.
5. No aclarar (excepto las superficies que estén en contacto directo con las mucosas, los alimentos o si se precisa una etapa de desinfección consecutiva).
6. Bloquear la seguridad después de su uso.

- Repetir la operación de desinfección cada vez que sea necesario.

## PRODUCTO

**SIN  
ALCOHOL**

**efecto  
SCALE**

**A PARTIR DE  
2 MIN.**

## BUENAS PRÁCTICAS



Archivo del producto disponible en  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

## Presentación comercial

- Caja 12 x 750mL: EXS0038
- Disponible también en formato toallitas: **exeol wipes optimal** (EXS0041)



Marcado CE obtenido en 2023  
DM de clase IIa



**Medifar**  
[www.medifar.com](http://www.medifar.com)  
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775  
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533  
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

**SANTÉ  
exeol**  
UNA DIVISIÓN DE SODEL

# exeol surf optimal

Detergente desinfectante sin alcohol para superficies y dispositivos médicos

Propiedades microbiológicas

Condiciones de suciedad, listo para usar, 20°C:

|                                                  | ENSAYOS                         | CEPAS                                                                                                                                                                                                                                    | TIEMPO DE CONTACTO |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bactericida                                      | EN 1276                         | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>                                                                                                                       | 2 min.             |
|                                                  | EN 13727<br>EN 16615            | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>                                                                                                                                                 |                    |
|                                                  | EN 13727<br>EN 16615            | <b>Cepas adicionales:</b> <i>Acinetobacter baumannii</i> (Multidrug-resistant), <i>Escherichia coli</i> (Carbapenem-resistant), <i>Klebsiella pneumoniae</i> (Carbapenem-resistant), <i>Staphylococcus aureus</i> (Methicilin-resistant) |                    |
| Levuricida                                       | EN 1650<br>EN 13624<br>EN 16615 | <i>Candida albicans</i><br><b>Cepa adicional:</b> <i>Candida auris</i>                                                                                                                                                                   | 2 min.             |
| Activo sobre <i>Aspergillus fumigatus</i>        | EN 13624<br>EN 17387            | <i>Aspergillus fumigatus</i>                                                                                                                                                                                                             | 30 min.            |
| Tuberculocida                                    | EN 14348                        | <i>Mycobacterium terrae</i>                                                                                                                                                                                                              | 30 min.            |
| Virucida contra los virus envueltos <sup>1</sup> | EN 14476<br>EN 16777            | Virus de la Vacuna <sup>1</sup> cepa <i>Elstree</i>                                                                                                                                                                                      | 2 min.             |
| Activo sobre Norovirus y Rotavirus               | EN 14476<br>EN 16777            | Norovirus Murino cepa S-99, Rotavirus cepa SA-11                                                                                                                                                                                         | 15 min.            |
| Activo sobre Adenovirus                          | EN 14476                        | Adenovirus tipo 5                                                                                                                                                                                                                        | 45 min.            |

<sup>1</sup> El virus de la Vacuna es el virus representativo de los virus envueltos que se presentan en el Anexo A de las normas EN 14476+A2 y EN 16777 y en el Anexo B de la norma EN 17111, como por ejemplo: Virus de la hepatitis B (VHB); Virus de la hepatitis C (VHC); Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); Herpesviridae (virus del herpes); Coronavirus; Virus de la gripe, la rabia, la rubéola, el sarampión; ...

| Composición                                                                                                                                                                                                  | Características                                                                                                     | Precauciones                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparación líquida biocida TP2/TP4.<br>Sustancias activas biocidas (% m/m):<br>Cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio (CAS: 68424-85-1) 0,08%; Cloruro de didecildimetilamonio (CAS: 7173-51-5) 0,16%. | <ul style="list-style-type: none"><li>pH: 6,5 - 7,5</li><li>Perfume: No perfumado</li><li>Color: Incoloro</li></ul> | Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.<br>UFI: 4C69-M0Y3-T007-XRAW |

SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France.  
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
www.exeol.fr

Medifar  
www.medifar.com  
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775  
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533  
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

SANTÉ  
exeol  
UNA DIVISIÓN DE SODEL