

# exeol sept E2

## Detergente desinfectante enzimático con pH neutro

► Solución enzimática para diluir para la limpieza y desinfección por inmersión de dispositivos médicos reutilizables invasivos y no invasivos, antes de la esterilización o desinfección final.

▪ **Efecto detergente potenciado por tensioactivos unidos a un dúo enzimático esencial.**

▪ **Activo en 10 minutos con una dilución del 0,4% (bactericida, levuricida y viricida contra los virus envueltos).**

**Poder detergente probado en biopelícula según NF EN ISO 15883-5: 2021.**

▪ **Contiene un agente quelante de iones metálicos y alcalino-terrosos fácilmente biodegradable.**



### INSTRUMENTOS ENDOSCOPIA

#### PRODUCTO

ACTIVO AL  
0,4%

ACTIVO  
DESDE  
10 MIN.

DETERGENCIA  
REFORZADA

#### BUENAS PRÁCTICAS



#### Instrucciones de uso

▪ **Dosis 20 mL:**

Cortar la dosis usando las líneas de precorte. Verter una dosis de 20mL en 5L de agua a temperatura ambiente: 0,4% (4mL/L).

▪ **Frasco dosificador 1L:**

Quitar el tapón y presionar los laterales del frasco para obtener la dosis deseada. Diluir la dosis obtenida con agua a temperatura ambiente: 0,4% (4mL/L).

Volver a cerrar el frasco después de su uso.

▪ **Bidón 5L:**

Cuando se use por primera vez, retirar el anillo de inviolabilidad y luego desenroscar el tapón. Fijar la bomba de 20 mL en el bidón y cebarla. No utilizar la dosis obtenida hasta que la bomba esté completamente cebada. Usando la bomba dosificadora, diluir el concentrado con agua a temperatura ambiente: 0,4% (4mL/L).

La solución diluida y no utilizada se puede conservar en una bandeja cubierta durante 72 horas.

#### Uso:

1. Colocar los dispositivos médicos abiertos y desmontados en la solución y asegurarse de que estén totalmente sumergidos. Limpiar, cepillar, escobillar e irrigar los canales, si es necesario.

2. Tiempo de contacto: 10 min. Respetar el tiempo de contacto recomendado.

3. Retirar los dispositivos médicos y aclararlos cuidadosamente con agua.

La solución utilizada debe cambiarse después de cada uso.

**exeol sept E2** puede utilizarse en una cubeta de ultrasonidos.

#### Presentación comercial

- Caja 250 x 20mL: EXS0048
- Caja 6 x 1L dosificador: EXS0046
- Caja 4 x 5L + 1 bomba 20mL: EXS0087



Archivo del producto disponible en  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

DM de clase IIa  
Marcado CE obtenido en 2023



**Medifar**  
[www.medifar.com](http://www.medifar.com)  
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775  
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533  
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

**SANTÉ**  
**exeol**  
UNA DIVISIÓN DE SODEL

# exeol sept E2

## Detergente desinfectante enzimático con pH neutro

### Propiedades microbiológicas

Condiciones de suciedad, 0,4%, 10 min., 20°C:

|                                                  | ENSAYOS  | CEPAS                                                                                    | CONCENTRACIÓN | TIEMPO DE CONTACTO |
|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Bactericida                                      | EN 13727 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> | 0,4%          | 5 min.             |
|                                                  | EN 14561 |                                                                                          | 0,4%          | 10 min.            |
| Levuricida                                       | EN 13624 | <i>Candida albicans</i>                                                                  | 0,4%          | 5 min.             |
|                                                  | EN 14562 | <b>Cepa adicional:</b> <i>Candida auris</i>                                              |               |                    |
| Viricida contra los virus envueltos <sup>1</sup> | EN 14476 | <i>Virus de la vacuna<sup>1</sup> cepa Elstree</i>                                       | 0,4%          | 10 min.            |
|                                                  | EN 17111 |                                                                                          |               |                    |

<sup>1</sup> El virus de la vacuna es el virus representativo de los virus envueltos que se presentan en el Anexo A de las normas EN 14476+A2 y EN 16777 y en el Anexo B de la norma EN 17111, como por ejemplo: Virus de la hepatitis B (VHB); Virus de la hepatitis C (VHC); Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); Herpesviridae (virus del herpes); Coronavirus; Virus de la gripe, la rabia, la rubéola, el sarampión; ...

| Composición                                                                                                              | Características                                                                                                                       | Precauciones                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloruro de didecildimetilamonio, tensioactivo no iónico, enzimas (proteasa y lipasa), colorante, perfumes y excipientes. | <ul style="list-style-type: none"><li>pH puro: 7 - 8</li><li>pH 0,4%: 6,5 - 7,5</li><li>Perfume*: Limón</li><li>Color: Azul</li></ul> | Lea siempre la etiqueta y las informaciones sobre el producto antes de usarlo.<br>UFI : HVF9-R09E-4007-EJ19 |

\*Perfume sintético



SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

 Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France.  
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
www.exeol.fr

**Medifar**  
www.medifar.com  
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775  
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533  
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

**SANTÉ**  
**exeol**  
UNA DIVISIÓN DE SODEL