

exeol GTA 2%

Desinfectante de alto nivel

► Solución lista para usar a base de glutaraldehído para la desinfección final por inmersión de dispositivos médicos termosensibles reutilizables, semicríticos y críticos, invasivos y no invasivos previamente limpiados.

- Solución lista para usar sin activador.
- Control de la validez del baño mediante tira de prueba (medición del nivel de glutaraldehído).
- Poder humectante sin efecto espumante.
- Tiempo de contacto a partir de 15 minutos.
- Activo sobre las esporas de *Clostridium difficile*.



INSTRUMENTOS ENDOSCOPIA

+ PRODUCTO

SIN
ACTIVADOR

ALTO
NIVEL

BUENAS PRÁCTICAS



LISTO PARA
USAR



REMOJO
MANUAL



TIRAS DE
PRUEBA



Archivo del producto disponible en
www.exeol.fr

Instrucciones de uso

- exeol GTA 2% está listo para usar.
- exeol GTA 2% se utiliza sin diluir en dispositivos médicos limpiados previamente.
- exeol GTA 2% puede utilizarse durante un máximo de 30 días.

Controlar regularmente la validez del baño con las tiras de control **exeol strips GTA 2%**.

Antes de usar **exeol GTA 2%**, realizar una limpieza previa o una limpieza mecánica completa, y un aclarado intermedio de los dispositivos médicos que se van a tratar. Cuando se use por primera vez, retirar el anillo de inviolabilidad y luego desenroscar el tapón.

1. Desenroscar el tapón del bidón y transvasar el contenido a la bandeja. Volver a cerrar el bidón después de su uso.
2. Colocar los dispositivos médicos abiertos y desmontados en la solución y asegurarse de que estén totalmente sumergidos. Asegurar la irrigación de los canales si están presentes. Cubrir la bandeja.
3. Tiempo de contacto: a partir de 15 min., según el espectro de actividad deseado.
4. Aclarar cuidadosamente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) antes de volver a utilizarlo.
5. Antes de almacenar, secar los productos mediante aire médico sobre una superficie seca limpiada previamente.

exeol strips GTA 2% :

1. Sumergir la tira de control **exeol strips GTA 2%** durante 1 segundo en **exeol GTA 2%**.
2. Sacudir ligeramente la tira de inmediato para eliminar el exceso de líquido.
3. Exactamente 15 segundos después de la extracción de **exeol GTA 2%**, observar el color del área de prueba y compararlo con la imagen de referencia en el envase.

DM de clase IIb

Marcado CE obtenido en 2023

CE 0459



Medifar
www.medifar.com

Buenos Aires +54 9 11 2732-4775
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

SANTÉ
exeol
UNA DIVISIÓN DE SODEL

exeol GTA 2%

Desinfectante de alto nivel

Propiedades microbiológicas

Condiciones de limpieza, listo para usar, 20°C:

	ENSAYOS	CEPAS	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida	EN 13727 EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>	10 min.
Fungicida	EN 13624 EN 14562	<i>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis</i>	10 min.
Tuberculocida	EN 14348 EN 14563	<i>Mycobacterium terrae</i>	10 min.
Micobactericida	EN 14348 EN 14563	<i>Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium</i>	15 min.
Virucida	EN 14476	Poliovirus, Adenovirus, Norovirus	10 min.
	EN 17111	Adenovirus, Norovirus	
Esporicida contra <i>Clostridium difficile</i>	EN 17126	<i>Clostridium difficile</i>	30 min.
Esporicida	EN 17126	<i>Bacillus cereus, Bacillus subtilis</i>	90 min.

Presentación comercial

- Caja 4 x 5L: EXS0092
- Tubo 100 tiras de control **exeol strips GTA 2%**: AC0207



Composición	Características	Precauciones
Glutaral 2% y excipientes.	▪ pH: 4,8 - 5,2 ▪ Perfume: No perfumado ▪ Color: Verde	Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. UFI : 7E59-20CR-E00S-PYX6



PELIGRO

SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

Medifar
www.medifar.com
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

SANTÉ
exeol
UNA DIVISIÓN DE SODEL